

---

## **Návod a upozornenie pre použitie** **Original Pezzi® GymnastikBall, PhysioBall, EggBall, SitSolution a Duetto**

Tento návod je nevyhnutnou príručkou pre správne a bezpečné použitie výrobkov Original Pezzi® GymnastikBall, PhysioBall, EggBall, SitSolution a Duetto, pretože obsahuje informácie potrebné k tomu, aby bol výrobok používaný k plnej spokojnosti užívateľa a v súlade s pravidlami bezpečnosti osôb počas celej životnosti výrobku a/lebo jeho častí.

### **STANOVENÉ POUŽITIE – OBMEDZENIA A VÝNIMKY**

Táto lopta bola navrhnutá a vyrobená pre použitie v rôznych oblastiach, a to v športe, fitness, gymnastike a tiež v lekárskom sektore a sektore vzdelávacom. Nesmie sa používať k iným účelom než tým, ktoré boli stanovené firmou Ledragomma.

Táto lopta znesie zaťaženie až 400 kg.

Nejde o hračku a v každom prípade lopta nie je vhodná pre deti mladšie ako 36 mesiacov – obsahuje totiž malé súčasti. Nebezpečenstvo udusenía.

Na lopte nevykonávajte cvičenia s použitím pák s protizávažím, číniek alebo akýchkoľvek druhov závažia.

### **OBSAH BALENIA**

Balenie obsahuje loptu, dva biele uzávery a jeden ventilok.

### **NAFUKOVANIE**

Na nafúknutie lopty je treba použiť buď pumpu používanú na nafukovanie lehátok, pumpu na bicykel (len v tomto prípade použite priložený ventilok), alebo kompresor. Nenaľukujte ústami.

### **POKYNY A POSTUP, KTORÉ TREBA DODRŽAŤ PRI PRVOM POUŽITÍ**

Pri prvom použití postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- pomocou vyššie uvedených pomôcok loptu začnite pomaly nafukovať, robte prestávky,
- neprekračujte rozsah 90 % priemeru naznačený na lopte a/lebo na obale,
- otvor uzatvorte pomocou jedného z bielych uzáverov, ktoré sú súčasťou balenia (druhý uzáver je rezervný),
- pred nafúkaním lopty na jej maximálny priemer a použitím vyčkejte 24 hodín.

### **POKYNY A UPOZORNENIA PRE NÁSLEDNÉ NAFUKOVANIE**

V prípade následných nafukovaní sa nikdy nesmie prekročiť stanovený maximálny priemer. V prípade nafukovania pomocou kompresora v blízkosti stanoveného maximálneho priemeru postupujte pomaly. Uzáver možno ľahko z otvoru odstrániť pomocou kávovej lyžičky.

### **UPOZORNENIA, KTORÝCH TREBA DBAŤ PRED KAŽDÝM POUŽITÍM LOPTY**

Pred každým použitím lopty skontrolujte jej povrch a v prípade, že sa na ňom nachádzajú škrabance, odraté miesta, dierky alebo iné poškodenia akékoľvek povahy, loptu nepoužívajte ako podporu tela. V takýchto prípadoch je ohrozená bezpečnosť lopty, ktorá by sa mohla okamžite pretrhnúť a spôsobiť pád osoby, ktorá na nej sedí.

Pred každým použitím loptu očistite vodou a jemným mydlom, odolné škvrny z nej odstráňte pomocou zriedeného alkoholu.

### **TEPLOTA, KTORÚ TREBA DODRŽIAVAŤ**

Pozor: loptu treba uchovávať pri izbovej teplote (približne 18 - 20° C). V prípade zvlášť nízkych teplôt loptu nafukujte až potom, keď sa dosiahne izbová teplota.

---

## POVRCHY, NA KTORÝCH LOPTU MOŽNO POUŽIŤ

Loptu treba používať na mäkkých povrchoch. Nepoužívajte loptu, ak sa v okolí nachádzajú ostré alebo špicaté predmety ani v blízkosti zdrojov tepla; ak loptu nepoužívate, zabráňte tomu, aby bola vystavená priamym slnečným lúčom.

## UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA OPRÁV

V prípade, že je lopta prepichnutá alebo prerezaná, nesnažte sa ju opraviť, lebo neodborne vykonané opravy narušujú celistvosť výrobku a môžu mať za následok vážne riziká pre bezpečnosť a zdravie užívateľa. Len u lôpt typu Maxafe® (Flexton Silpower® material- Pat.No.EP 1 409 088 B1 - Pat. No. US 7,144,354 B2) je možno malé dierky a rezy do 5 mm dĺžky opraviť, a to s použitím špeciálnej súpravy určenej na vykonávanie opráv „Fixa-kit”.

## MONITOROVANIE

Na výrobku nájdete kód pozostávajúci zo 4 číslic, poukazuje na mesiac a rok výroby produktu. V prípade reklamácie prosím uveďte tento kód, bude ho treba pre určenie dátumu a série použitých materiálov.

## OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Firma Ledragomma odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné zranenie osôb, zvierat alebo poškodenie vecí či životného prostredia, ku ktorým došlo v súvislosti s použitím výrobkov, pri ktorom nebol dodržaný návod na použitie a údržbu uvedený v tomto inštruktážnom letáčku a upozornenia priložené k výrobku. **POZOR!** V prípade závažnej nehody prosím informujte výrobcu a príslušné miestne orgány.

## LIKVIDÁCIA

Pomôcka musí byť zlikvidovaná v súlade s platnými právnymi predpismi.

## POZNÁMKY

Farby a vzory sa môžu meniť v závislosti od verzie výrobku.

EggBall má jedinečný „vaječný“ tvar, a tým ponúka väčšiu kontaktnú základňu s podlahou, čím poskytuje zvýšenú stabilitu počas používania. Ich podlhovastý tvar umožňuje, aby na EggBall sedeli dvaja ľudia naraz. Predstavujú ideálnu pomôcku pre tých, ktorí chcú vykonávať gymnastické cvičenia s loptou bezpečne a s najvyššou mierou stability.

Dostupné v 4 rôznych veľkostiach:

- Ø 45 x 65
- Ø 55 x 80
- Ø 65 x 95
- Ø 84 x 125

a v rôznych farbách, sú vyrobené z odolného a elastického plastového materiálu. Tieto lopty sú dostupné aj vo verzii Maxafe®, exkluzívnom materiáli Flexton Silpower®.

Duetto je výrobok určený pre jemnú gymnastiku a rehabilitáciu. Je obzvlášť stabilný a pohodlný, môže byť použitý pri rehabilitácii a tréningu v telocvični. Ideálne pre tých, ktorí potrebujú zlepšiť svoje motorické zručnosti a koordináciu.

Je dostupný v 2 rôznych veľkostiach:

- Ø 55 x 85
- Ø 70 x 115

a v rôznych farbách, je vyrobený z odolného a elastického plastového materiálu. Je dostupný aj vo verzii Maxafe®, exkluzívnom materiáli Flexton Silpower®.



CERTIFIED SYSTEM  
ISO9001 / ISO14001 / ISO13485



**ORIGINAL PEZZI**

[www.tonkey.it](http://www.tonkey.it)

**MADE IN  
ITALY**



ISTRUZIONI DI RICICLABILITÀ - RECYCLABILITY INSTRUCTIONS - RECYCLABILITY-ANWEISUNGEN



- Dispose of properly
- Non disperdere nell'ambiente
- Freisetzung in die Umwelt vermeiden



- Device
- Dispositivo
- Gerät



- Plug
- Tappo
- Stöpsel



- Valve
- Valvolina
- Ventil