
Návod a upozornenie pre použitie Original Pezzi® Pro Maxafe®

Tento návod je nevyhnutnou príručkou pre správne a bezpečné použitie výrobkov Original Pezzi® Pro Maxafe®, pretože obsahuje informácie potrebné k tomu, aby bol výrobok používaný k plnej spokojnosti užívateľa a v súlade s pravidlami bezpečnosti osôb počas celej životnosti výrobku a/lebo jeho častí.

STANOVENÉ POUŽITIE – OBMEDZENIA A VÝNIMKY

Táto lopta bola navrhnutá a vyrobená pre použitie v rôznych oblastiach, a to v športe, fitness, gymnastike a tiež v lekárskom sektore a sektore vzdelávacom. Nesmie sa používať k iným účelom než tým, ktoré boli stanovené firmou Ledragomma.

Táto lopta znesie zaťaženie až 600 kg.

Nejde o hračku a v každom prípade lopta nie je vhodná pre deti mladšie ako 36 mesiacov – obsahuje totiž malé súčasti. Nebezpečenstvo udusenía.

Na lopte nevykonávajúte cvičenia s použitím pák s protizávažím, číniek alebo akýchkoľvek druhov závažia.

OBSAH BALENIA

Balenie obsahuje loptu, dva biele uzávery a jeden ventilok.

NAFUKOVANIE

Na nafúknutie lopty je treba použiť buď pumpu používanú na nafukovanie lehátok, pumpu na bicykel (len v tomto prípade použite priložený ventilok), alebo kompresor. Nenaľufkujte ústami.

POKYNY A POSTUP, KTORÉ TREBA DODRŽAŤ PRI PRVOM POUŽITÍ

Pri prvom použití postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- pomocou vyššie uvedených pomôcok loptu začnite pomaly nafukovať, robte prestávky,
- neprekračujte rozsah 90 % priemeru naznačený na lopte a/lebo na obale,
- otvor uzatvorte pomocou jedného z bielych uzáverov, ktoré sú súčasťou balenia (druhý uzáver je rezervný),
- pred nafúkaním lopty na jej maximálny priemer a použitím vyčkajte 24 hodín.

POKYNY A UPOZORNENIA PRE NÁSLEDNÉ NAFUKOVANIE

V prípade následných nafukovaní sa nikdy nesmie prekročiť stanovený maximálny priemer. V prípade nafukovania pomocou kompresora v blízkosti stanoveného maximálneho priemeru postupujte pomaly. Uzáver možno ľahko z otvoru odstrániť pomocou kávovej lyžičky.

UPOZORNENIA, KTORÝCH TREBA DBAŤ PRED KAŽDÝM POUŽITÍM LOPTY

Pred každým použitím lopty skontrolujte jej povrch a v prípade, že sa na ňom nachádzajú škrabance, odraté miesta, dierky alebo iné poškodenia akékoľvek povahy, loptu nepoužívajte ako podporu tela. V takýchto prípadoch je ohrozená bezpečnosť lopty, ktorá by sa mohla okamžite pretrhnúť a spôsobiť pád osoby, ktorá na nej sedí.

Pred každým použitím loptu očistite vodou a jemným mydlom, odolné škvrny z nej odstráňte pomocou zriedeného alkoholu.

TEPLOTA, KTORÚ TREBA DODRŽIAVAŤ

Pozor: loptu treba uchovávať pri izbovej teplote (približne 18 - 20° C). V prípade zvlášť nízkych teplôt loptu nafukujte až potom, keď sa dosiahne izbová teplota. POVRCHY, NA KTORÝCH LOPTU

MOŽNO POUŽIŤ

Loptu treba používať na mäkkých povrchoch. Nepoužívajte loptu, ak sa v okolí nachádzajú ostré alebo špicaté predmety ani v blízkosti zdrojov tepla; ak loptu nepoužívate, zabráňte tomu, aby bola vystavená priamym slnečným lúčom.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA OPRÁV

V prípade, že je lopta prepichnutá alebo prerezaná, nesnažte sa ju opraviť, lebo neodborne vykonané opravy narušujú celistvosť výrobku a môžu mať za následok vážne riziká pre bezpečnosť a zdravie užívateľa. Len u lôpt typu Maxafe® (Flexton Silpower® material- Pat.No.EP 1 409 088 B1 - Pat. No. US 7,144,354 B2) je možno malé diery a rezy do 5 mm dĺžky opraviť, a to s použitím špeciálnej súpravy určenej na vykonávanie opráv „Fixa-kit”.

MONITOROVANIE

Na výrobku nájdete kód pozostávajúci zo 4 číslic, poukazuje na mesiac a rok výroby produktu. V prípade reklamácie prosím uveďte tento kód, bude ho treba pre určenie dátumu a série použitých materiálov.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Firma Ledragomma odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné zranenie osôb, zvierat alebo poškodenie vecí či životného prostredia, ku ktorým došlo v súvislosti s použitím výrobkov, pri ktorom nebol dodržaný návod na použitie a údržbu uvedený v tomto inštruktážnom letáčku a upozornenia priložené k výrobku. **POZOR!** V prípade závažnej nehody prosím informujte výrobcu a príslušné miestne orgány.

LIKVIDÁCIA

Pomôcka musí byť zlikvidovaná v súlade s platnými právnymi predpismi.

POZNÁMKY

Farby a vzory sa môžu meniť v závislosti od verzie výrobku.

Cvičebné lopty ProMaxafe sa dokonale prispôbia aj tým najnáročnejším použitiam. Sú ideálne pre široké využitie, od gymnastiky cez rehabilitáciu, fitness až po aerobik, tanec, šport, terapiu....

Cvičebné lopty Pro Maxafe sú vhodné pre veľmi namáhavé cvičenia. Ich vysoká nosnosť ich predurčuje k vykonávaniu posilňovacích cvikov s pomocným závažím. Lopta nestráca svoje dynamické vlastnosti potrebné k lepšiemu a efektívnejšiemu cvičeniu ani pri veľkom zaťažení. To odlišuje tento produkt od tradičnej posilňovacej lavice.

Dostupné sú v 3 rôznych veľkostiach: 53, 65 a 75 centimetrov.



ORIGINAL PEZZI

www.tonkey.it

**MADE IN
ITALY**



ISTRUZIONI DI RICICLABILITÀ - RECYCLABILITY INSTRUCTIONS - RECYCLABILITY-ANWEISUNGEN



- Dispose of properly
- Non disperdere nell'ambiente
- Freisetzung in die Umwelt vermeiden



**PVC
PLASTICA**

- Device
- Dispositivo
- Gerät



**PE-HD
PLASTICA**

- Plug
- Tappo
- Stöpsel



**PA-OTHER
PLASTICA**

- Valve
- Valvolina
- Ventil